



Kurzanleitung - Combi-Schloss



1

Richten Sie die Traverse-Schiene und die Combi-Schloss Schiene miteinander aus.



2

Sobald die Schienen ausgerichtet sind, öffnen sich die Sicherheitsverriegelungen automatisch.



3

Nach Überprüfung, ob die Sicherheitsverriegelungen eingerastet sind, stellen Sie sich direkt hinter oder vor das Hebe-modul. Nun können Sie das Hebe-modul sicher über das Combi-Schloss bis zur festen bzw. Traverse-Schiene ziehen.



4

Sobald das Hebe-modul das Combi-Schloss passiert hat, können Sie sicher die Traverse bewegen.

ACHTUNG



*Bewegen Sie die Traverse **NICHT**, wenn sich das Hebe-modul in dieser Position befindet!*



*GH1Q sollte **NIE**MALS in Systemen mit einem Combi-Schloss verwendet werden, da ein Risiko besteht, dass der Lifter herunterfällt.*



Kurzanleitung - Combi-Schloss



1 Platzieren Sie das Hebemodul an der gelben Markierung, die sich in ca. 1 Meter Abstand der Traverse vom Combi-Schloss befindet.



2 Platzieren Sie den Nutzer mit dem Gesicht längs der Traverse blickend und in einer Höhe, in der Sie den Nutzer schieben und halten können, wie auf dem Foto gezeigt.

Um die Schienen auszurichten und mit dem Combi-Schloss zu verbinden, stellen Sie sich neben den Nutzer, damit Sie den Nutzer gradlinig schieben oder ziehen können.

Wenn das Combi-Schloss nicht beim ersten Mal einrastet, bewegen Sie die Traverse ca. $\frac{1}{2}$ bis 1 Meter von der Combi-Schloss Schiene zurück und versuchen es erneut.



3 Wenn das Combi-Schloss eingerastet ist, stellen Sie sich hinter den Nutzer und schieben ihn auf der Traverse entlang durch das Combi-Schloss. Der Nutzer schaut noch immer in die Längsrichtung der Traverse.