

Løftemodulers og skinnetyper indflydelse på løftehøjde

Dette skema viser hvilken konsekvens valget af løftemoduler og skinnetyper har på løftehøjden i to forskellige løftesituationer:

1. Forflytning til og fra seng
2. Forflytning til og fra kørestol

De nærmere forudsætninger er beskrevet nederst.

	Skinner	Rumhøjde 225 cm		Rumhøjde 240 cm		Rumhøjde 250 cm		Rumhøjde > 300 cm	
		Seng (x)	Kørestol (y)	Seng (x)	Kørestol (y)	Seng (x)	Kørestol (y)	Seng (x)	Kørestol (y)
GH3/GH1	A-Rail	- 10	+ 25	+ 5	+ 40	+ 15	+ 50	+ 65	+ 100
	B-Rail	- 16	+ 18	- 1	+ 33	+ 9	+ 43	+ 59	+ 93
	C-Rail	- 21	+ 13	- 6	+ 28	+ 4	+ 38	+ 54	+ 88
GH1 Q	A-Rail	- 11	+ 24	+ 4	+ 39	+ 14	+ 49	+ 64	+ 99
	B-Rail	- 18	+ 17	- 3	+ 32	+ 27	+ 42	+ 77	+ 92
	C-Rail	- 22	+ 12	- 7	+ 27	+ 22	+ 37	+ 72	+ 87
GH1 F	A-Rail	- 26	+ 9	- 11	+ 24	- 1	+ 34	+ 49	+ 84
	B-Rail	- 33	+ 2	- 18	+ 17	- 8	+ 27	+ 42	+ 77
	C-Rail	- 38	- 3	- 23	+ 12	- 13	+ 22	+ 37	+ 72
GHZ	GHZ-Rail	0	+ 33	+ 14	+ 48	+ 24	+ 58	+ 74	+ 108

Alle mål er i cm


Felterne i skemaet er enten røde eller grønne

- Røde felter indikerer at der ikke er tilstrækkelig løftehøjde. Det betyder at det vil være nødvendigt at løfte fødder/ben manuelt. Tallet i feltet viser hvor megen afstand der mangler.
- Grønne felter indikerer at løftehøjden er tilstrækkelig og hvor megen afstand der er ekstra.

Forudsætninger


- Person højde 180 cm
- Sejl Basic Basic str. Medium
- Seng GB4 afstand fra gulv til overkant madras er 48 cm
- Kørestol højde fra gulv til overkant sæde er 55 cm

GHZ **GH3/GH1** **GH1 Q** **GH1 F**

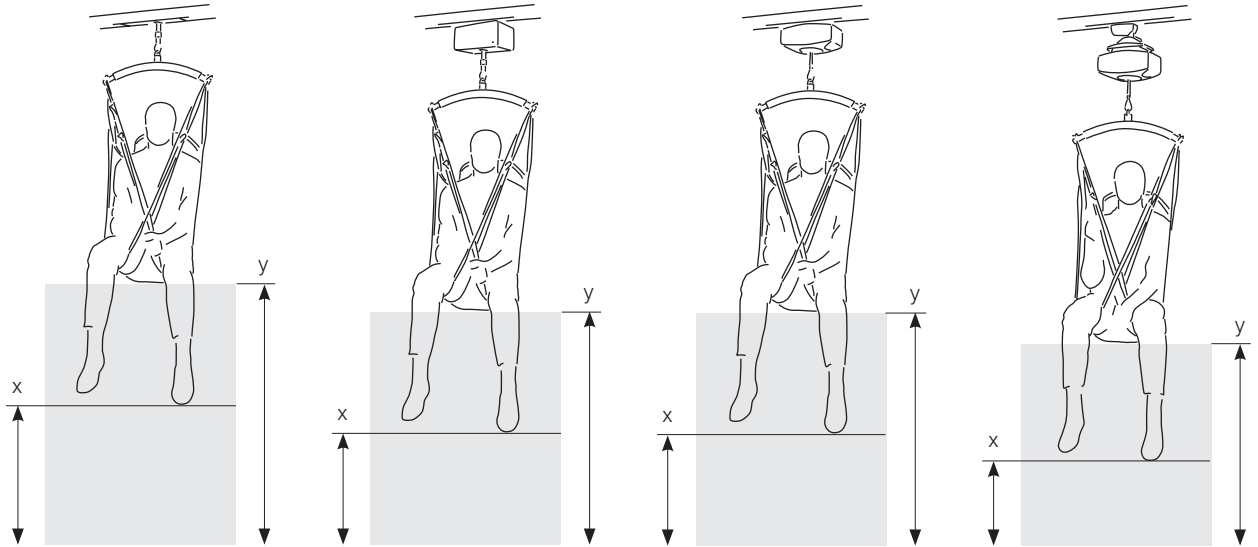

Seng

Kørestol

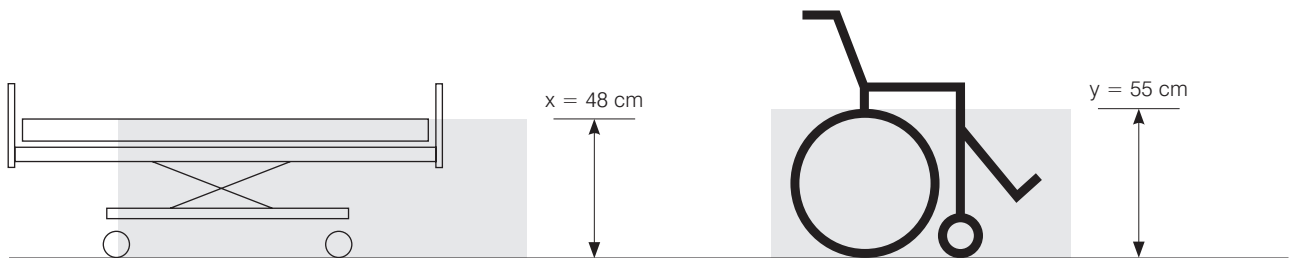

| Time to care |