



GTP1

Piattaforma per il trasferimento GTP1

Trasferimento facile, comodo e sicuro in posizione eretta

La Piattaforma per il trasferimento GTP1 è uno strumento di lavoro mobile manuale che facilita la movimentazione degli utenti con sufficiente forza residua negli arti inferiori in grado di assumere la posizione eretta.

Partecipando attivamente al trasferimento, l'utente è in grado di utilizzare e sviluppare la propria funzione muscolare e il proprio equilibrio.

La Piattaforma per il trasferimento GTP1 è robusta e stabile e garantisce supporto e sicurezza durante operazioni di trasferimento brevi. Nel caso in cui sia necessario un supporto ulteriore è possibile abbinare alla piattaforma la cintura di trasferimento.

Le attività di movimentazione e manipolazione tipiche eseguibili con la GTP1 Transfer Platform includono:

- Trasferimento da e verso un WC/comoda
- Trasferimento da e verso una sedia per doccia
- Esercizi di recupero funzionale di alzata e seduta (mobilizzazione)
- Mantenimento di una postura eretta (mobilizzazione)

Semplice e sicura da usare

La Piattaforma per il trasferimento GTP1 è facile da spostare e ha un ingombro ridotto. Può essere spinta, tirata e ruotata intorno al suo asse. Questo la rende molto facile da manovrare, anche in spazi limitati.

Versatile ed efficiente

La Piattaforma per il trasferimento GTP1 può essere utilizzata in tutti gli ambienti sanitari e garantisce un trasferimento dell'utente attivo e sicuro in posizione eretta manovre di lavoro ergonomiche e sicure per il personale sanitario.

La Piattaforma per il trasferimento è facile da trasportare da un luogo all'altro, ad esempio nell'assistenza domiciliare, in quanto le sezioni superiore e inferiore possono essere facilmente smontate e trasportate separatamente.

Portata massima 175 kg.



Dettagli Prodotto



Impugnatura multigrip

L'impugnatura, che ha una superficie morbida e antiscivolo, è progettata ergonomicamente con prese ricurve su tre livelli. Ciò consente all'utente e all'assistente sanitario di scegliere il punto migliore a cui reggersi; le tre maniglie possono essere utilizzate anche progressivamente dall'utente durante l'operazione di alzata o seduta.



Spessore Ridotto

La pedana è in alluminio stampato con una superficie antiscivolo. Lo spessore di soli 30 mm e la forma ne facilitano il posizionamento in prossimità della sedia a rotelle o del WC. Lo spessore ridotto facilita l'utente nel posizionamento dei piedi sulla pedana.



Supporto regolabile per la parte inferiore della gamba

Il supporto regolabile per la parte inferiore della gamba è dotato di una morbida e confortevole imbottitura. Per ottenere il massimo sostegno, il supporto può essere regolato in altezza e ruotato o inclinato in modo semplice e veloce utilizzando la maniglia di regolazione rapida.



Freno centrale

Il freno a pedale posizionato al centro blocca entrambe le ruote contemporaneamente. Il freno è dotato di una codifica a colori che indica chiaramente se è bloccato o meno.



Cintura di trasferimento

La cintura di trasferimento è utilizzata per garantire maggiore supporto e sicurezza durante il trasferimento. Viene posizionata intorno alla parte superiore del corpo dell'utente e fissata all'impugnatura centrale multigrip della Piattaforma per il trasferimento GTP1. NOTA: la cintura di trasferimento non deve essere utilizzata per portare l'utente in posizione eretta.



Predisposta per il riciclo

Le superfici lisce e la struttura robusta rendono la Piattaforma per il trasferimento GTP1 facile da pulire e adatta alla sanificazione ed igienizzazione. La Piattaforma per il trasferimento GTP1 è progettata per lo smaltimento ed il riciclo dei materiali a fine ciclo di vita.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Srl
N° Verde 800 781 604
Tel. +39 0521 660132
Fax +39 0521 691399
italia@guldmann.com
www.guldmann.it