




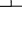









## Quick Guide – GH1 F

- Liften tændes ved at trykke på en af kontaktene på håndbetjeningen.
- Hvis liften ikke vil tænde kan det skyldes, at nødstopet er aktiveret.
- Fastgør løbekattens anker med snor til låsemekanismen i toppen af løftemodulet. Tryk på  øverst på håndbetjeningen. Når installationsfunktionen er valgt, vil knappen lyse. Installationen aktiveres ved et kortvarigt tryk på . Afvent et langt kontinuerligt bip. Dette bekræfter, at installationen er gennemført. Når GH1 F er låst i løbekatten trykkes igen på  for at stoppe installationen. Herefter kan løftemodulet anvendes til løft og forflytning ved hjælp af  og .
- For at afinstallere løftemodulet trykkes på  og derefter kortvarigt på . Vent til snoren er helt strakt før du frigør ankeret fra løftemodulet. Tryk på  igen for at færdiggøre afinstallationen.
- Løftemodulet oplades ved at placere håndbetjeningen i ladestationen der er på transportvognen. Håndbetjeningen bør altid efterlades i ladestationen, når løftemodulet ikke er i brug. Strømforsyningen skal være tilsluttet og tændt.
- Max. løftekapacitet er anført på liften, til f.eks. 255 kg. Vær opmærksom på, at skinnesystemet eller sejlet kan have lavere løftekapacitet. Det er altid den laveste løftekapacitet, der er gældende.
- Læs venligst GH1 F brugermanual for yderligere informationer.



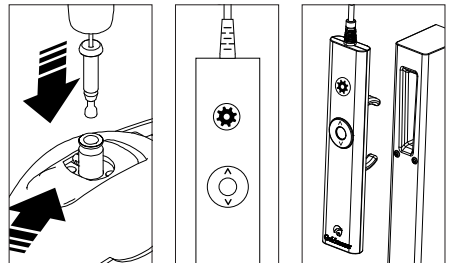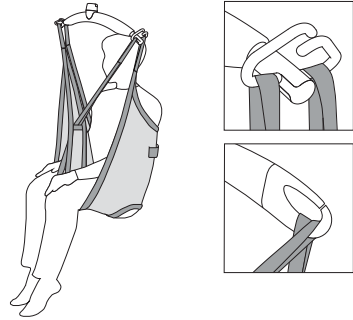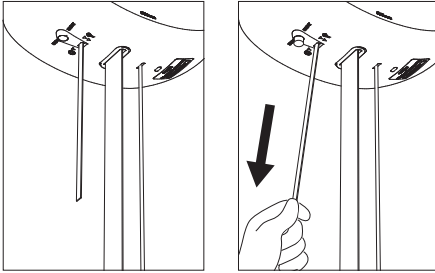

## Sikkerhedsfunktioner

### Nødstop

- Ét træk i den røde strop. Bruges kun i nødstilfælde, hvor der er behov for at afbryde liften omgående.
- Når nødstopet er aktiveret, er det udelukkende liftens nødфир, der fungerer.
- Nødstopet deaktiveres ved at trykke "stop-pet" (gul knap) op i liften. Derefter trykkes der 2 gange på én af tasterne på håndbetjeningen.

### Nødфир

- Aktiveres ved et vedvarende træk i den røde strop. Bruges kun i nødstilfælde. Anvendes til at fire brugeren ned ved funktionssvigt i liften.

## Tilbehør

### Løftebøjlen

Sejlstropperne placeres i krogene. Kontrollér at stropperne er korrekt monteret på bøjlen.

### Løftesejl

Vi anviser, at der benyttes løftesejl med loop-ophæng til fastgørelse på løftebøjle med 2 eller 4 ophængspunkter og som altid modsvarer liftens løftekapacitet. Benyt altid produkter som er separat CE-mærket.

Opstår der tvivl om brugen af løftesejl kontakt altid leverandøren.

## Daglig rengøring og vedligeholdelse

Rengøring skal foregå med en fugtig klud og almindelige rengøringsmidler. Der må ikke anvendes stærke syrer, baser eller alkohol til rengøring. Se evt. brugermanual.



Scan her for brugermanual  
m.m. vedrørende brug af GH1 F.

| Time to care |

### Kontakt Guldmann på:

Salg: +45 8741 3100  
salgdk@guldmann.com  
Service: +45 8741 3191  
service@guldmann.com