














## Verkorte handleiding – GH1 F

- De plafondlift wordt ingeschakeld door op een van de knoppen op de handbediening te drukken.
- Als de tillift niet wordt ingeschakeld, kan dit komen doordat de noodstop is geactiveerd.
- Bevestig het anker met koord van de GH1F trolley aan het vergrendelingsmechanisme bovenaan de tillift. Druk op de -knop boven op de handbediening. De knop licht op in de installatiemodus. Druk kort op  om de installatie te activeren. Wacht op een lange aanhoudende pieptoon om te bevestigen dat de installatie voltooid is. Als GH1 F is vergrendeld in de GH1F trolley, druk dan nogmaals op  om de installatiemodus te stoppen. De tillift kan nu worden gebruikt om te tillen met behulp van de  en .
- Voor het de-installeren van de tillift, kies de  en druk kort op de  om te activeren. Wacht tot het koord volledig is uitgestrekt voordat u de tillift loslaat. Druk nogmaals op  om de de-installatiemodus te voltooien.
- De tillift kan worden opgeladen door de handbediening in het laadstation op de transportrolley te plaatsen. De handbediening moet altijd in het laadstation worden geplaatst als deze niet wordt gebruikt. De voeding moet aangesloten en ingeschakeld zijn.
- De maximale tilcapaciteit van de tillift wordt aangegeven op de tillift, bijvoorbeeld 255 kg. Houd er rekening mee dat het railsysteem of de tilbanden een lagere tilcapaciteit kunnen hebben. De laagste tilcapaciteit mag niet worden overschreden.
- Zie voor meer informatie de GH1 F gebruikershandleiding.



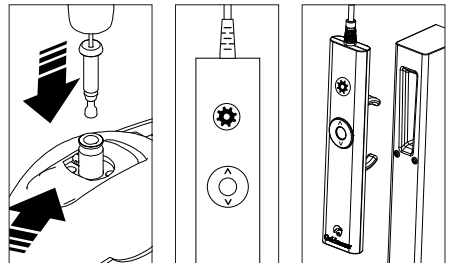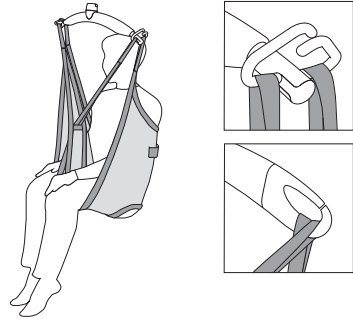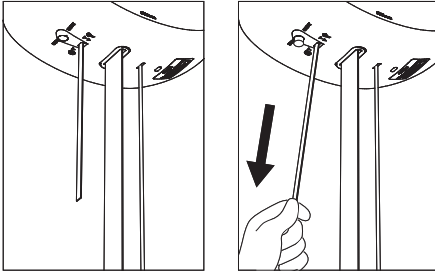

## Veiligheidsfuncties

### Noodstop

- Eén keer trekken aan het rode koord. Alleen gebruiken in noodgevallen, als het onmiddellijk nodig is om de tillift te stoppen.
- Als de noodstop is geactiveerd, werkt alleen de nooddaalknop van de tillift.
- Deactiveer de noodstop door op de 'reset'-knop (gele knop) op de tillift te drukken. Druk vervolgens twee keer op een van de knoppen op de handbediening.

### Nooddaal

Dit wordt geactiveerd door langdurig aan het rode koord te trekken. Alleen gebruiken in noodgevallen. Met deze functie kan de patiënt worden neergelaten als de tillift niet werkt.



**Scan hier voor handleidingen  
e.d. over het gebruik van de  
GH1 F.**

## Accessoires

### Juk

Plaats de tilbanden in de haken. Controleer of de lussen correct zijn bevestigd aan het juk.

### Draagband

We raden aan draagband te gebruiken met twee of vier lusbevestigingen om de tilbanden aan het juk te bevestigen. De tilbanden moeten altijd overeenkomen met de tilcapaciteit van de tillift. Gebruik altijd afzonderlijk gemarkeerde CE-producten. Neem ingeval van twijfel over het gebruik van een draagband contact op met uw leverancier.

## Dagelijkse reiniging en onderhoud

Reinig met een vochtige doek en een gewoon reinigingsmiddel. Gebruik geen sterke zuren, basen of alcohol bij het schoonmaken. Zie gebruikershandleiding

| Time to care |

**Guldmann BV**  
Tel.: 053 428 30 90  
info@guldmann.nl  
www.guldmann.nl