



Quick Guide - Combi-lås



1

Placer traversskinnen så den er ud for Combi-låsen.



2

Når skinnerne er på linje ud for Combi-låsen aktiveres sikkerheds-låsen automatisk.



3

Når sikkerheds-låsen er aktiveret, er der fri passage mellem de to skinner, og det er nu sikkert at køre liften gennem Combi-låsen og over på den anden skinne.



4

Når liften er passeret gennem Combi-låsen, er det sikkert at køre med traversskinnen.

ADVARSEL



Kør **IKKE** med traversskinnen, når liften er i denne position!



GH1Q må **ALDRIG** anvendes i systemer med Combi-lås, da der er nedstyrtningsfare forbundet med at bruge en forkert loftlift i systemet.



Quick Guide - Combi-lås med bruger



1

Placer liften ved den gule markering, ca. 1 meter fra enden af traversskinnen og Combi-låsen.



2

Placer brugeren med ansigtet mod længderetningen på traversskinnen og i en højde, hvor du kan skubbe / holde som på billedet.

For at få skinnerne på linje og aktivere Combi-låsen skal du placere dig selv på siden af brugeren, så du kan skubbe eller trække vinkelret på traversskinnen.

Hvis Combi-låsen ikke aktiverer første gang, så flyt traversskinnen ca. $\frac{1}{2}$ til en 1 meter væk fra Combi-låsen og prøv igen.



3

Når Combi-låsen er aktiveret, stiller du dig bag ved brugeren og skubber langs traversskinnen gennem Combi-låsen. Brugeren skal stadig vende med ansigtet i samme længderetning som traversskinnen.